

SoloStar® insülin kalemleri için hızlı başvuru kılavuzu

Doktorunuz, işaretli Sanofi öğün insülinini reçete etmiştir. Lütfen SoloStar® kullanıma hazır kalem içeren hızlı etkili insülin paketiyle birlikte gelen kullanım talimatını okuyun.

Kalemi yalnızca uygun Becton Dickinson and Company (BD), Ypsomed, Artsana veya Owen Mumford iğneleriyle kullanın. Hangi iğnelerin uygun olduğunu doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize sorun.

i


1

İlk uygulamadan 1 saat önce



İlk enjeksiyonunuzdan 1 saat önce insülini buzdolabından çıkarın.


2



İnsülin XYZ
100E SOLOSTAR
Son kullanma tarihi:
00/0000


Ellerinizi yıkayın ve enjeksiyon bölgesini temizleyin. İnsülin etiketini ve son kullanma tarihini kontrol edin.

3

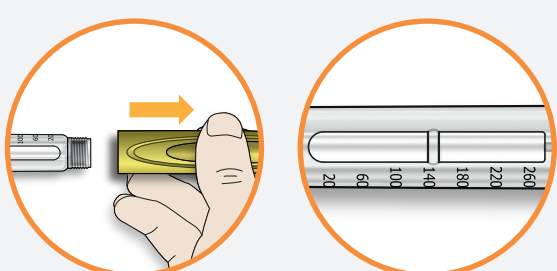


Kalem kapağını çıkarın ve çözeltinin berrak olup olmadığını kontrol edin.

4

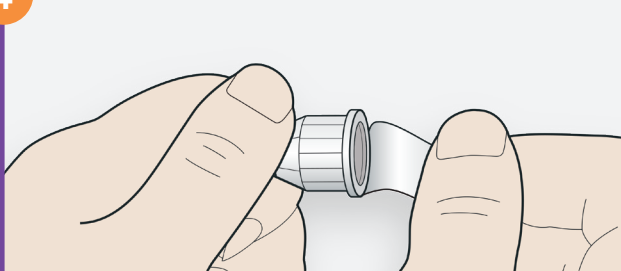


Koruyucu filmi iğne kapağından çıkarın.

5

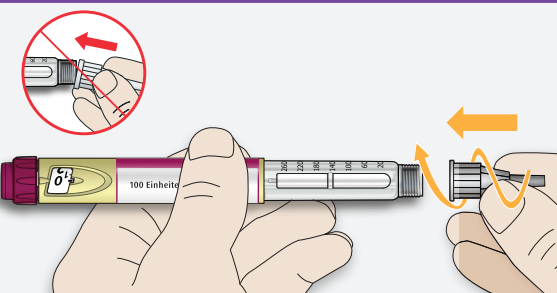


İğneyi doğrudan kaleme takıp çevirin.

6

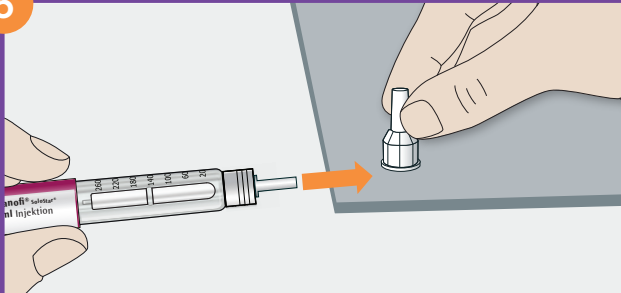


Dıştaki iğne kapağını çıkarıp bir kenarda muhafaza edin.

7

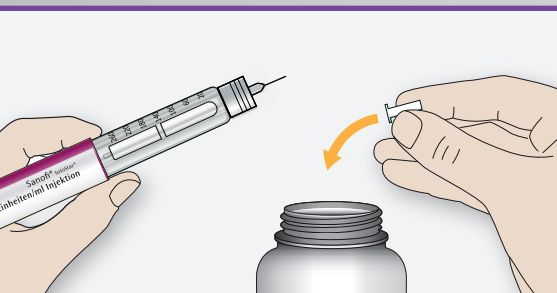


İçteki iğne kapağını çıkarıp atın.

8

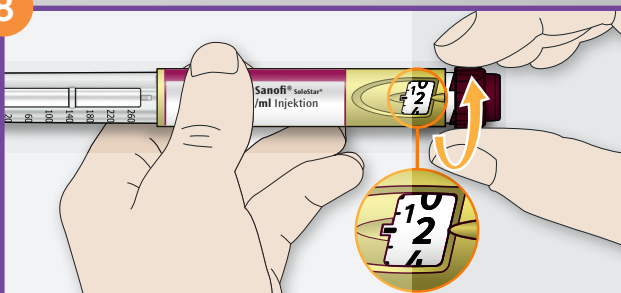


Güvenlik testi için dozajı "2 ünite" olarak ayarlayın.

9

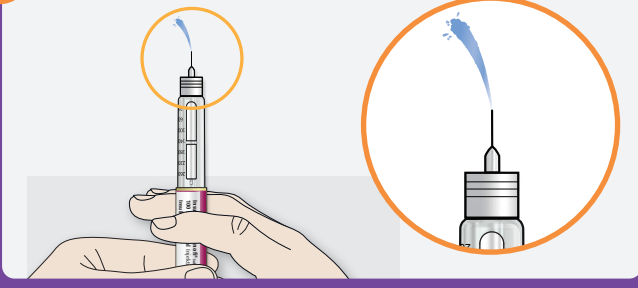


İğnenin ucundan insülin çıkana kadar enjeksiyon düğmesine basın.

10

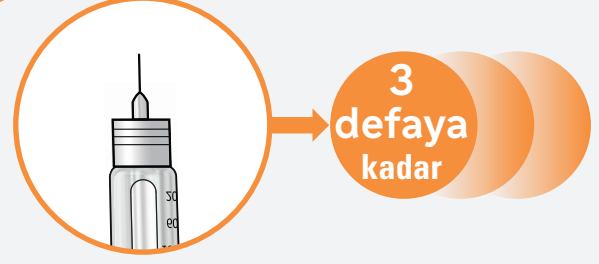


İnsülin çıkmazsa, güvenlik testini insülin çıkana kadar üç defa tekrarlayın.

11

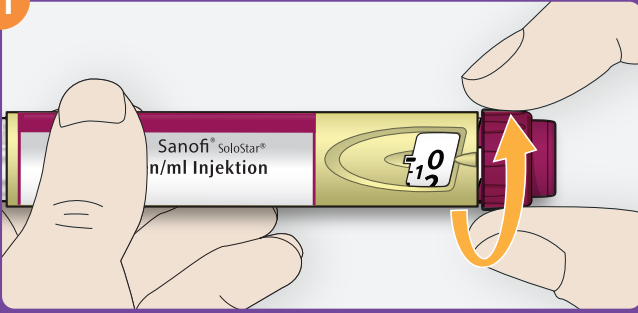


İstenen doz gözükeneye kadar dozaj halkasını çevirin.

12

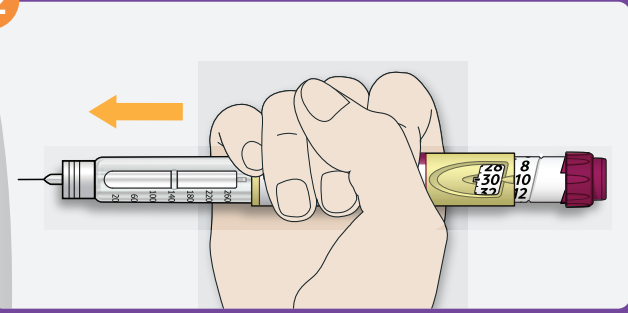


Kalemi cilde 90 derecelik bir açıyla batırın.

13

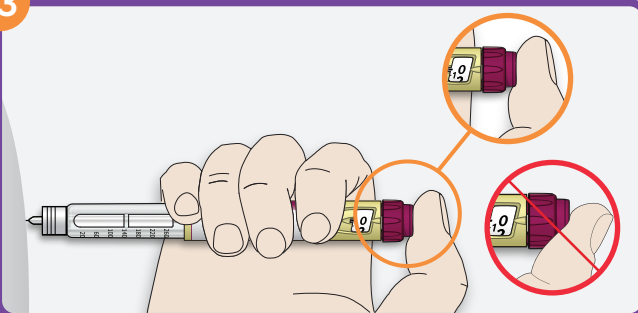


Başparmağınızla doğrudan enjeksiyon düğmesine basın.

14

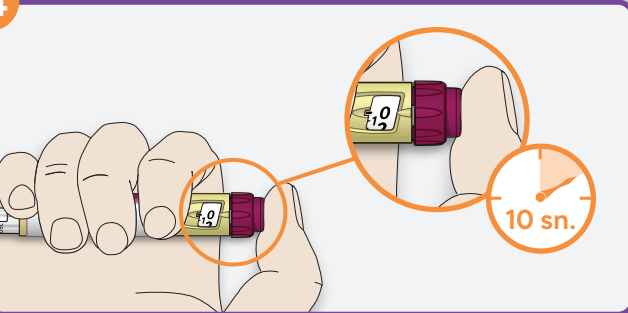


Enjeksiyon düğmesini basılı tutun. "0" görüldüğünde yavaşça 10'a kadar sayın.

15

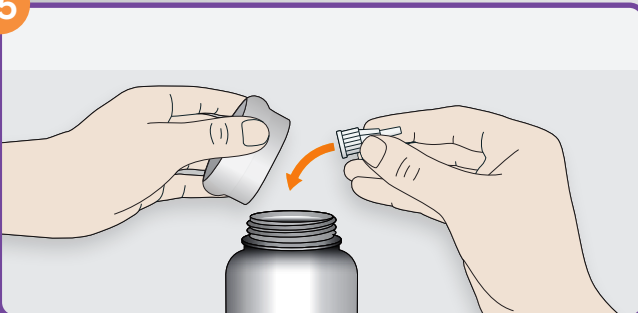

Dıştaki iğne kapağını iğnenin üzerine yerleştirin ve kalemden çevirerek çıkarın. İğneyi atın.

16

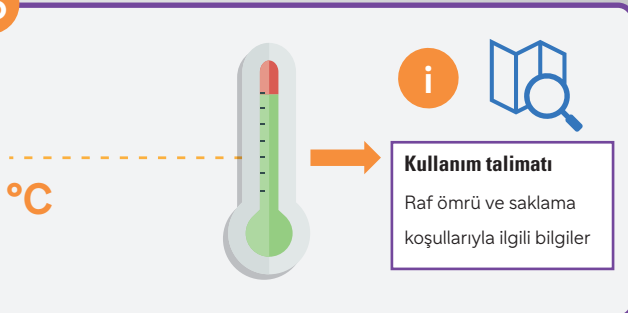

Öğün insülinini ilk kullanımdan sonra oda sıcaklığında saklayın: İnsülininizin 25°C'nin altında mı yoksa 30°C'nin altında mı saklanması gerektiğini öğrenmek için lütfen kullanım talimatına bakın.

Diyabet Hizmet Merkeziniz

0800 52 52 010

(Almanya içi sabit hatlardan ve mobil ağlardan ücretsiz)

E-posta: medinfo.de@sanofi.com
Web sitesi: diabetes.sanofi.de

sanofi