

# GUÍA DE USO DE LOS DISPOSITIVOS

Lantus® SoloSTAR®



Apidra® SoloSTAR®



CAPACIDAD DE 1 A 80 UNIDADES

INTERVALO DE DOSIS DE 1 UNIDAD

EL SELECTOR DE DOSIS PUEDE GIRAR HACIA DELANTE Y HACIA ATRÁS



ATENCIÓN CONTINUADA PARA TODOS  
24 HORAS AL DÍA/7 DÍAS A LA SEMANA

900 24 77 24


sanofi

Estas instrucciones se suministran únicamente como una guía. Lea completamente el prospecto antes de utilizar SoloSTAR<sup>®</sup> por primera vez. Si tiene alguna pregunta, consulte con su médico o personal de enfermería.

### ANTES DE EMPEZAR, COMPRUEBE QUE SE TRATA DE LA INSULINA CORRECTA


#### 1 INSERTE UNA NUEVA AGUJA

Mantenga la aguja recta e insertada.

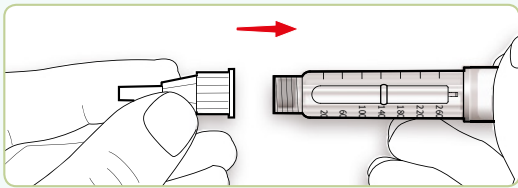


#### 2 REALICE UNA PRUEBA DE SEGURIDAD

Esto elimina las burbujas de aire y asegura que la pluma y la aguja funcionarán correctamente. Seleccione una dosis de 2 unidades.

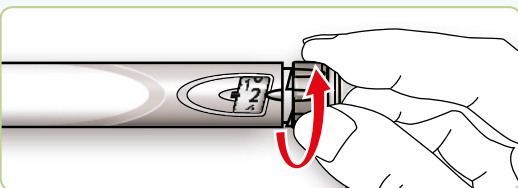

Quite el protector de la aguja.

Mantenga la pluma con la aguja apuntando hacia arriba y presione el botón de inyección completamente. Compruebe que sale insulina por la aguja.

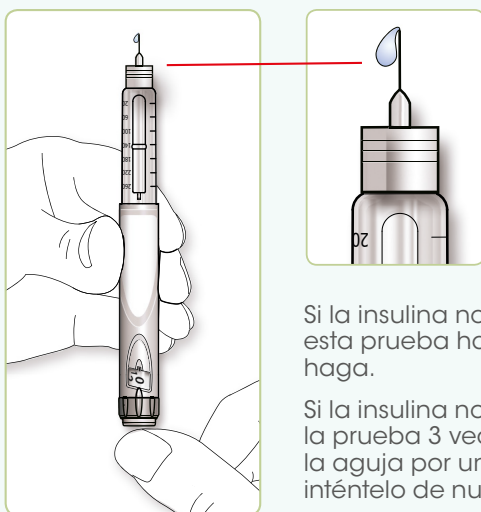


Si la insulina no sale, repita esta prueba hasta que lo haga.

Si la insulina no sale tras repetir la prueba 3 veces, cambie la aguja por una nueva e inténtelo de nuevo.

#### 3 SELECCIONE SU DOSIS

(Este ejemplo muestra 30 unidades).

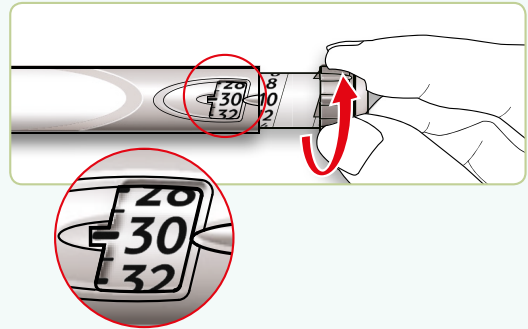


#### 4 INYECTE SU DOSIS

Utilizando la técnica de inyección que le haya enseñado su médico o personal de enfermería, inserte la aguja en la piel. Presione el botón de inyección completamente.

Mantenga el botón de inyección presionado y cuente despacio hasta 10.

A continuación retire la aguja.

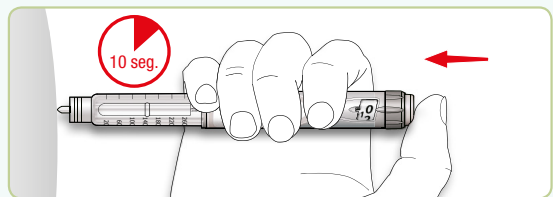

#### 5 RETIRADA Y ELIMINACIÓN DE LA AGUJA

La aguja siempre debe eliminarse y desecharse después de cada inyección.

Las agujas no deben reutilizarse.

Se debe tener especial precaución cuando se retire y desecha la aguja.

Se deben seguir las recomendaciones de seguridad.

El capuchón de la pluma debe colocarse en la pluma.